

# AGE system

(Age Erasing System)

## 使用说明书



### 机器名称



### 部件

商品开封时，请确认下面的部件齐与否，开始使用。

#### 基本部件


机器、LTV、加尔瓦尼棒、素接地棒、air刷、电源

## 型号适用功能

型号	适用功能
AGE SYSTEM	SCALP(头部管理), FACIAL(管理皮肤)
AGE SYSTEM-S	SCALP(管理头皮), FACIAL除外功能
AGE SCALP	SCALP(管理头皮)
AGE FACIAL	FACIAL(管理皮肤))



## 加尔瓦尼 离子机

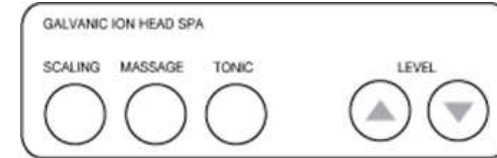

功率调节阶段：5阶段

功能：SCALING, 按摩, TONIC

使用时间：5分钟

**Scaling(清洗功能)：**涂SCALING剂头部之后使用

- ① 手术者握住加尔瓦尼棒，被手术者抓住素接地棒。
- ② 按SCALING按钮。
- ③ 按照被手术者的头皮状态，按LEVEL调节电流。
- ④ 一般使用2, 3阶段。  
(自动定时功能:5分钟后自动结束)

**Message(按摩功能)：**坐着洗头时使用

- ① 手术者握住加尔瓦尼棒，被手术者抓住素接地棒。
- ② 按Message按钮。
- ③ 按照被手术者的头皮状态，按LEVEL调节电流。
- ④ 一般使用2, 3阶段。  
(自动定时功能:5分钟后自动结束)


**Tonic(营养供给功能)：**涂TONIC用制剂之后使用

- ① 手术者握住加尔瓦尼棒，被手术者抓住素接地棒。
- ② 按Message按钮。
- ③ 按照被手术者的头皮状态，按LEVEL调节电流。
- ④ 一般使用2, 3阶段。  
(自动定时功能:5分钟后自动结束)

※注意事项

被手术者会感觉到一点刺激，调低LEVEL按钮，不会让被手术者感觉到。

## LTV(Light Therapy Vibrator)

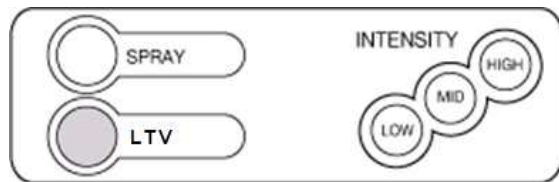

**强度调节阶段：3阶段**

**功能：近红外线(940nm), RED光线(628nm)**

**开启时间：5分钟**

- ① 按LTV按钮。
- ② 调节INTENSITY。  
(LOW: 头皮使用 MID、HIGH：为松弛颈椎及斜方肌使用)
- ③ 顺着头皮全部的穴点轻轻地按摩。
- ④ 近红外线以便能充分照射头皮，轻轻地进行按摩。

### 使用后管理方法

使用后只清洗机器的头部分并挂上支架上。

## 喷雾(SPRAY)

- ① 按照Solution的类型放进喷雾容器合适的制剂。
- ② 按SPRAY按钮。
- ③ 拉喷雾枪的杠杆，喷射。
- ④ 用喷雾枪后面的旋钮调节喷射量。

### 使用后管理方法

把精制水放进air刷的容器装备之后，空出喷射管子里的水，挂上支架上保管。

## 泡沫器

- ① 把适当量的洗发精和水放进泡沫桶里。
- ② 使用时挡住位于泡沫器的上面的孔。
- ③ 如果泡沫浓度很浓，洗发精和水的比率再次弄稀之后使用。

### 使用后管理方法

使用完后只洗机器的头部分，挂上支架上保管。

## 注意事项及安全事项

本机器是电子机器，使用时注意不要机器接触水或者潮气。  
请不要机器放在高温地方和高温机器。

### ○ 伽尔瓦尼禁忌：

皮肤炎、过敏性皮肤、过度扩张毛细血管的皮肤、高血压、糖尿病、使用心脏机器的人、孕妇、金属移植手术者、手术患者、伤口部位和癫痫患者等。

### ○ 伽尔瓦尼手术时注意事项：

- ① 手术者的手拿着棒子另外手拿着被手术者、仔细进行手术。
- ② 阳极和阴极互相不一样的效果，要选好极。
- ③ 使用伽尔瓦尼时毛细血管破坏很多的部位禁止使用。
- ④ 虽然本产品采用安全的电流量，但个人感觉各有差异，使用时请调节。

### ○ LTV 使用时安全事项：

- ① 本产品让客户感到舒适。
- ② 按摩时感觉痛或者不舒服，请马上停止使用，与管理师或者医生商量。
- ③ 不要集中一个部位五分钟以上使用。
- ④ 使用中洗粉或者拧干地湿布擦机身。机器应避免接触水。
- ⑤ 机器的头部分用水洗净后凉干后使用。
- ⑥ 禁止在发炎或者斑疹及充血等部位使用。

## 商品规格

输入电源	AC220V, 60Hz	
耗电	200VA	
规格	350(W) x 400(D) x 980(H) mm	
SPA(期权)	AG,BG,AO / 真空压力：640mmHg	
伽尔瓦尼	输出：15V	
喷雾	喷出压力：3kg/cm <sup>2</sup>	
泡沫机(期权)	依气压强制喷出方式	
LTV	输出：3W 近红外线：940nm RED光线：628nm	
环境条件	动作	温度：15~40℃ 湿度：30~75%
	保存	温度：0~50℃ 湿度：30~80%

## 产品保证书 ∞ ∞

- ◎ 在我们(株)MITEC根据消费者补偿规定(财定经济部 告示 第2000-21号)进行各品种的保证。
- ◎ 请求服务时(株)MITEC或者指定的协助工资提供服务。
- ◎ 产品保修期12个月。

产品名	头皮管理机	型号	AgE system
购买时间	年 月 日	SERIAL NO.	
购物代理店		销售金额	

### 无偿服务

消费者被害类型		补偿内容	
		保证期间以内	保证期间以后
正常情况下使用机器时发生性能·功能上的缺陷的故障	购买后天以内需要重要的修理	无偿修理或者产品交换	X
	发生可以修理的故障	无偿修理	有偿修理
因消费者故意而过失发生的故障	不能修理的情况	收取有偿修理的金额之后产品交换	按公司规定
	可以修理的情况	有偿修理	有偿修理

### 有偿服务

不是故障原因要求服务，付费用，请读一下使用说明书。

#### ① 因消费者过失发生故障

- ☞ 消费者不小心操作及自行修理发生故障时
  - 使用不一样的电量发生故障
  - 设置后移动时发生摔地上等情况或损伤
  - 因当事公司没有制定的消耗品、期权品使用发生的故障
  - 当事公司及不是当事公司协助公司的人修理发生故障

#### ② 其他情况

- 自然灾害(火灾、地震、水灾等)的故障
- 使用时不小心陶瓷杯、陶瓷电缆等的破损

(株)M.I.Tech Co., Ltd

此保证书只能在韩国使用，不补发。请和说明书保管好。