

AGE system

(Age Erasing System)

사용설명서



기기의 명칭



구성품

제품개봉시 아래의 구성품을 확인하고 사용을 하여 주시길 바랍니다.

기본구성품


본체, LTV, 갈바닉봉, 접지봉, 에어브러쉬, 전원코드

모델별 적용기능

모델명	적용기능
AGE SYSTEM	SCALP(두피관리), FACIAL(피부관리)
AGE SYSTEM-S	SCALP(두피관리), FACIAL기능 제외
AGE SCALP	SCALP(두피관리)
AGE FACIAL	FACIAL(피부관리)



갈바닉이온기

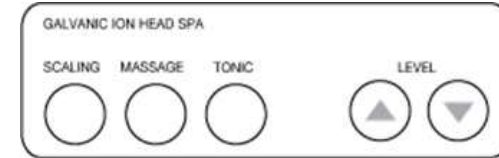

출력조절단계 : 5단계
 기능 : 스킨링, 마사지, 토닝
 작동시간 : 5분

Scaling(세정 작용) : 스킨링제를 두피에 바른 후 사용

- ① 시술자는 갈바닉 붓을 잡고 피시술자는 접지봉을 잡도록 한다.
- ② Scaling 버튼을 누른다
- ③ 피술자의 두피의 맞게 LEVEL 버튼을 눌러 전류량을 조절한다.
- ④ 기본적으로 2,3 단계로 맞추어 사용한다.
 (오토 타이머기능:5분 후 자동 종료)

Message(마사지 작용) : 좌식 삼푸 시 사용

- ① 시술자는 갈바닉 붓을 잡고 피시술자는 접지봉을 잡도록 한다.
- ② Message 버튼을 누른다.
- ③ 피술자의 두피의 맞게 LEVEL 버튼을 눌러 전류량을 조절한다.
- ④ 기본적으로 2,3 단계로 맞추어 사용한다.
 (오토 타이머기능:5분 후 자동 종료)


Tonic(영양공급 작용): 토닉용 제제를 바른 후 사용

- ① 시술자는 갈바닉 붓을 잡고 피시술자는 접지봉을 잡도록 한다.
- ② Message 버튼을 누른다.
- ③ 피술자의 두피의 맞게 LEVEL 버튼을 눌러 전류량을 조절한다.
- ④ 기본적으로 2,3 단계로 맞추어 사용한다.
 (오토 타이머기능:5분 후 자동 종료)

※주의사항

피시술자가 자극을 느낄 경우 LEVEL를 낮추어 느껴지지 않도록 한다.

LTV(Light Therapy Vibrator)

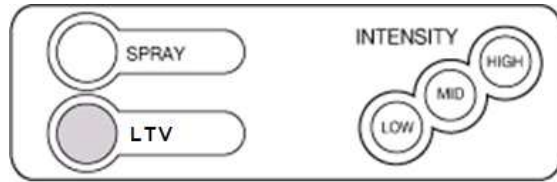

강도조절단계 : 3단계

기능 : 근적외선(940nm), RED광선(628nm)

작동시간 : 5분

- ① LTV 버튼을 누른다.
- ② INTENSITY를 조절한다.
(LOW: 두피용 MID:HIGH : 경추및 승모근을 이완용)
- ③ 두피 전체 혈점을 따라 부드럽게 마사지 한다.
- ④ 근적외선을 두피에 충분히 조사될 수 있도록 천천히 부드럽게 진행한다.

사용 후 관리방법

사용 후 헤드부분만 세척 후 거치대에 걸어서 건조시킨다.

스프레이(SPRAY)

- ① 원하는 타입의 솔루션을 스프레이 건 용기에 담는다.
- ② SPRAY 버튼을 누른다.
- ③ 스프레이건의 레버를 당겨서 분사한다.
- ④ 스프레이건 뒤쪽의 다이얼을 돌려 분사량을 조절한다.

사용 후 관리방법

정제수를 에어브러쉬의 용기에 담아 장착한 후 분사시켜 호스안에 토너를 깨끗히비워낸 후 거치대에 걸어서 보관한다.

거품기

- ① 거품기 통에 샴푸와 물을 적당량 혼합하여 채워놓는다.
- ② 거품기의 위쪽에 있는 구멍(Hole)을 검지 손가락으로 막아서 사용한다.
- ③ 거품의 농도가 높을 경우 샴푸와 물의 비율을 묽게 하여 사용한다.

사용 후 관리방법

사용 후 헤드부분만 세척 후 거치대에 거치시킨다.

주의사항 및 안전사항

본 제품은 전기기기이므로 습기나 물이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

전열기구 및 고온에 노출되지 않도록 주의해 주십시오.

○ 갈바닉 사용 금기 피부:

피부염, 과 예민성 피부, 심한 모세혈관 확장피부, 고혈압, 당뇨병, 인공 심장기 착용자, 임산부, 금속이식 수술자, 수술환자, 상처가 있는 부위, 간질 환자등.

○ 갈바닉 시술 시 주의사항:

- ① 시술자의 한 손은 붕을 잡고 한 손은 피 시술자를 잡아 한 개의 회로를 만들 듯이 시술한다
- ② 양극과 음극이 서로 다른 효과가 있기 때문에 극을 잘 선택하여야 한다.
- ③ 갈바닉 사용시 모세혈관이 많이 파괴된 부위에는 사용하지 않도록 한다.
- ④ 신체의 안전한 미세 전류량 이지만 개인에 따라 느껴지는 자극 정도가 달라질 수 있으므로, 세기를 조절해 가며 적용한다.

○ LTV 사용시 안전사항:

- ① LTV마사지기를 사용하시게 되면 편안하고 안락함을 느끼실 수 있습니다.
- ② 만일 마사지시 통증을 느끼시거나,불편함을 느끼실 경우 즉시, 사용을 중단하고 관리사나, 의사와 상의하시기 바랍니다.
- ③ 한 부위만 집중적으로 5분 이상 지속적으로 사용하지 않도록 합니다.
- ④ 중성세제나 젖은 헝겊을 사용하여 제품의 본체를 닦으십시오. 본체가 물에 담기지 않도록 주의합니다.
- ⑤ 헤드 부분은 물로 헹구어 내신 후 말려서 사용 하십시오.
- ⑥ 염증부위나 발진, 충혈된 곳은 사용하지 마십시오

제품규격

입력전원	AC220V, 60Hz	
소비전력	200VA	
규격	350(W) x 400(D) x 980(H) mm	
SPA(옵션)	AG,BG,AO / 진공압력 : 640mmHg	
갈바닉	출력 : 15V	
스프레이	분출압력 : 3kg/cm ²	
거품기(옵션)	공기압에 의한 강제 분출방식	
LTV	출 력 : 3W 근적외선 : 940nm RED광선 : 628nm	
환경조건	동작	온도 : 15~40℃ 습도 : 30~75%
	저장	온도 : 0~50℃ 습도 : 30~80%

제 품 보 증 서 ∞ ∞

- ◎ 저희 (주)엠아이테크에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◎ 서비스 요청 시 (주)엠아이테크 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- ◎ 제품 보증기간은 12개월입니다.

제 품 명	두피관리기	모 델 명	AgE system
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

소비자 피해유형		보 상 내 용	
		보증기간이내	보증기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 7일 이내에 중요한 수리를 요할 때	무상수리 또는 제품교환	해당 없음
	수리가능 고장이 발생하였을 경우	무상수리	유상수리
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	당사 기준에 한함
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요

① 소비자 과실로 고장인 경우

- ☞ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 당사 및 당사 협력업체가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

② 그밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 사용부주의로 도자컵, 도자케이블 등이 파손된 경우

(주)엠아이테크

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요